

Vielen Dank für Ihren Auftrag und das uns entgegengebrachte Vertrauen! Wir hoffen, dass wir Sie mit unserer Beratung, den handwerklich hergestellten Hilfsmitteln und unserem Service rundum zufrieden stellen. Wir möchten für Sie ein kompetenter und vertraulicher Ansprechpartner sein! Sollte etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit verlaufen möchten wir Sie bitten, uns zu kontaktieren. So können wir für Ihr Anliegen zeitnah eine Lösung finden.

Gebrauchsanweisung für Einlagen

- ✓ Bei Bedarf die tägliche Tragezeit langsam erhöhen, um den Körper an die Einlagen zu gewöhnen.
- ✓ Legen Sie die Einlagen nur in dafür geeignete Schuhe. Die Schuhe, in denen Sie Ihre Einlage tragen, sollten ausreichend Platz bieten, an der Ferse hoch genug geschnitten sein und kein Fußbett besitzen.
- ✓ Vertauschen Sie nicht Ihre Einlagen in den Schuhen.
- ✓ Kontrollieren Sie nach dem ersten Tag Ihre Füße auf Rötungen oder auf Druckstellen
- ✓ Die Einlagen wurden von uns sorgfältig nach Ihren Maßen gefertigt. Bei auftretenden Beschwerden wenden Sie sich bitte umgehend an uns.
- ✓ Trocknen Sie die Einlagen nie an der Heizung oder anderen Wärmequellen.
- ✓ Um eine optimale therapeutische Wirkung zu erzielen, sollen Sie die Einlagen so oft wie möglich tragen - auch zuhause.
- ✓ Bei Kindern unbedingt auf das Wachstum achten, da kleine Einlagen zu großen Schädigungen führen können.
- ✓ Damit die Sicherheit weiterhin gewährleistet werden kann, dürfen nur nach einem Baumuster zertifizierte Einlagen (siehe DGUB 112-119) in Arbeitssicherheitsschuhen getragen werden.

Sie sind zufrieden?

Dann bewerten Sie uns bitte online bei Facebook oder Google.

Vielen Dank!

